

Manual de instrucciones femSense Fertilidad




©SteadySense GmbH,
Kärntner Straße 518,
8054 Seiersberg-Pirka, Austria
Versión: 2.0, Fecha de emisión: 2021-04-29

Descripción de los símbolos



Número de lote

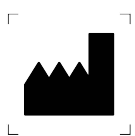

Fabricante



Utilizable hasta




Dispositivo médico



Producto desechable



Desechable en el contenedor destinado a las pilas

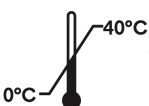

Temperatura de almacenamiento



Siga las instrucciones electrónicas de uso



Punto verde



Instrucciones de seguridad



Información

Instrucciones de uso

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad y cúmplalas. El uso o la eliminación inadecuados pueden ser perjudiciales para la salud y suponer riesgos para terceros.

¿Qué es femSense Fertilidad?

femSense Fertilidad es un dispositivo médico para la determinación de la fertilidad en mujeres en edad fértil. femSense Fertilidad consiste en un parche de medición de la temperatura que se puede llevar puesto, el parche femSense, y una aplicación correspondiente para smartphone que lo acompaña para iOS y Android.

El parche femSense es un dispositivo de un solo uso que se adhiere bajo la axila y se emplea durante el ciclo por un tiempo de hasta 7 días, registrando continuamente la temperatura corporal.

La aplicación femSense Fertilidad puede utilizarse para determinar la fertilidad y para el objetivo: embarazo. La aplicación femSense es un accesorio del parche femSense que sirve de interfaz de usuario para la visualización del estado de la fertilidad y coordina las acciones con el parche. En la aplicación femSense, usted mismo puede elegir el modo de funcionamiento:

- En el modo objetivo:embarazo, la aplicación le ofrece información sobre tu ciclo, sus días fértiles y si se puede detectar la ovulación y cuándo.
- En el modo de seguimiento de la fertilidad, la aplicación le ofrece información sobre su estado de fertilidad diario, le muestra los días de alta fertilidad y si se puede detectar la ovulación y cuándo.

El parche femSense es un producto no invasivo que sólo puede aplicarse sobre piel sana y basándose en las mediciones de la temperatura corporal proporciona información sobre los días fértiles de una mujer sin ningún propósito diagnóstico o terapéutico. femSense no muestra las mediciones de temperatura.

¿A quién está dirigido femSense Fertilidad?

femSense está dirigido a mujeres en edad fértil de 16 a 49 años que deseen tener hijos o que quieran hacer un seguimiento del estado de fertilidad de su ciclo menstrual.



femSense Fertilidad no es un método anticonceptivo y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

Restricciones

Bajo diversas indicaciones médicas, femSense no puede determinar de manera fiable la ovulación. Entre ellas se encuentran:

- Enfermedades graves, agudas o crónicas.
- Abuso de nicotina o alcohol
- Amenorrea
- Oligomenorrea (sangrado menstrual inusual)
- Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
- Obesidad (IMC > 30)
- Hirsutismo
- Alergia conocida a los componentes de los parches cutáneos.
- Medicamentos que puedan influir sobre la temperatura corporal como efecto secundario
- Los tratamientos hormonales pueden afectar a la temperatura corporal y, por tanto, a la fiabilidad de femSense.

Las condiciones de peso extremas pueden reducir la fiabilidad de femSense Fertilidad. Si no está segura de si femSense es adecuado para usted, hable con su médico antes de usar femSense.



Instrucciones de seguridad

- El parche es un producto desechable, utilícelo sólo una vez y durante no más de 7 días.
- No emplees el parche si estás enferma.
- Mantén el parche fuera del alcance de los niños, animales y personas discapacitadas.
- No aplicar el parche sobre heridas o quemaduras.
- No uses el parche si tienes alergia a los adhesivos.
- No dobles el parche o intentes abrirlo.
- No tomes baños largos o vayas a nadar mientras usas el parche
- No uses el parche si está dañado o contaminado.
- No aplique el parche si la superficie adhesiva ha sido contaminada.

- No intentes desmontar o abrir el parche.
- Cuando retires tu parche, al aplicar uno nuevo en el siguiente ciclo, colócalo debajo del otro brazo.
- Quítate el parche antes de una resonancia magnética o un TAC.
- El parche es un pequeño dispositivo electrónico. Por lo tanto, por favor no lo tires a la basura doméstica normal
- No arrojes el parche al fuego, la batería podría explotar.
- No lleves el parche más tiempo del indicado en la App.
- Si el contacto del parche con la piel te hace sentir incómoda, retíralo inmediatamente.
- Usa el parche sólo bajo las condiciones ambientales detalladas.
- Guarda el parche en un lugar seco y protegido de la luz solar
- El uso del parche puede causar irritación local de la piel. Sin embargo, tras la retirada del parche, estos deberían haber remitido al cabo de 24 a 48 horas.
- El parche no debe aplicarse a seres vivos que no pertenezcan al grupo específico de usuarios de femSense Fertilidad (mujeres de 16 a 49 años).
- El parche no debe estar expuesto permanentemente a un campo NFC.



Recomendaciones de uso

- femSense Fertilidad está destinado a la determinación de la fertilidad y no muestra curvas de temperatura.
- El parche sólo se puede leer a través de NFC.
- Necesitas la aplicación femSense para poder usar un parche.
- El parche sólo debe usarse según las instrucciones de la aplicación.
- Sólo se puede utilizar un parche por ciclo.
- Si la duración del ciclo varía considerablemente, la fiabilidad de femSense puede reducirse.
- El parche debe llevarse en la posición correcta bajo el brazo para garantizar una determinación fiable de la ovulación.
- No aplique el parche hasta que la aplicación se lo indique.
- Aplicar el parche sólo como se describe en las instrucciones de uso.
- Lavar y secar bien la piel de la axila antes de aplicar el parche.
- No utilizar desodorantes o cremas antes de la aplicación.
- No toque la cara adhesiva del parche, ya que puede afectar a la fuerza adhesiva.
- Untar bien el parche por todos los lados tras su aplicación.
- El parche debe leerse al menos una vez al día a través de NFC para recibir actualizaciones diarias.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda leer el parche diariamente por la mañana y por la noche.
- El periodo máximo de aplicación del parche es de 7 días.
- Retirar el parche inmediatamente si se siente incómodo.
- Evitar deportes intensos u otras actividades que provoquen sudoración excesiva (sauna/baño de vapor) durante su uso.
- Evite los baños de sol prolongados y los entornos que puedan afectar significativamente a la temperatura de su superficie durante el uso.

- Puede realizar actividades cotidianas como la higiene personal, el trabajo o el ejercicio ligero con el parche puesto en todo momento



Ayuda

Si detectas un mal funcionamiento del producto o efectos secundarios inesperados mientras utiliza femSense, ponte en contacto con nuestro soporte técnico: support@femsense.com. o pulsa "Contactar soporte técnico" en el menú de la App femSense.

En www.femsense.com/de/faq encontrarás más información que te servirá de ayuda

Descargar la App femSense Fertilidad



Aplicación para iPhone 7 y superior



Smartphones Android con NFC

Los modos de funcionamiento de femSense Fertilidad

femSense Fertilidad ofrece dos modos de funcionamiento,

- Modo objetivo: embarazo para las mujeres que quieren quedarse embarazadas y
- Modo de seguimiento de la fertilidad, que permite a las mujeres seguir su estado de fertilidad.

Cuando te registres en la App femSense, deberás elegir uno de los dos modos. Puedes cambiar esta decisión en cualquier momento en el menú de la App femSense. Dependiendo del modo que seleccione, la pantalla "Hoy" se mostrará de forma ligeramente diferente.

La utilización del parche

Tras el registro y la introducción de los datos de tu ciclo, femSense calcula su perfil de ciclo individual y te muestra en el calendario cuándo es probable que seas más fértil. La pantalla "Hoy" le indicará cuándo debe aplicar el parche femSense.

Una vez que llegue el día de pegado del parche, siga estos pasos.



1. Preparación

Si la App femSense te indica que te apliques el parche, dúchate con un jabón no graso o un gel de ducha y seca bien la zona debajo de la axila. También puede limpiar la zona debajo de la axilla con una toallita desinfectante. Asegúrese de no utilizar desodorante o loción corporal antes de la aplicación, ya que esto puede reducir poder adhesivo.




En el interior del envase del producto femSense, encontrará instrucciones rápidas sobre cómo pegar el parche.




2. Aplicar el parche

Para aplicar el parche, relaje el hombro, coloque la mano en la cadera y sitúa 3 dedos en la axila para determinar la posición del parche. Retire la pequeña parte de la lamina de soporte y fije el parche con la pequeña zona adhesiva. Ahora, antes de aplicar el parche, vuelve a colocar la mano en la cadera y relaja el hombro.

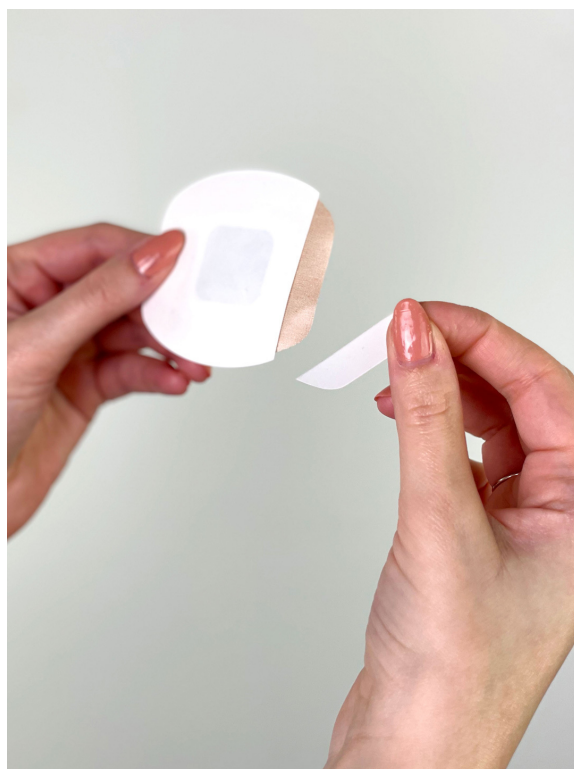



El parche debe aplicarse de forma que quede centrado entre el pecho y la espalda, y de forma que el borde superior del parche tenga tres dedos de ancho por debajo de la axila. Pegue el parche de manera que los lados redondos queden hacia arriba y hacia abajo. Asegúrese de que su hombro está en una posición relajada y su mano está en la cadera mientras aplica el parche. A continuación, doble el parche sobre el borde y retire la parte restante del soporte adhesivo y aplica una ligera presión en todos los sentidos para asegurar la fijación del parche.

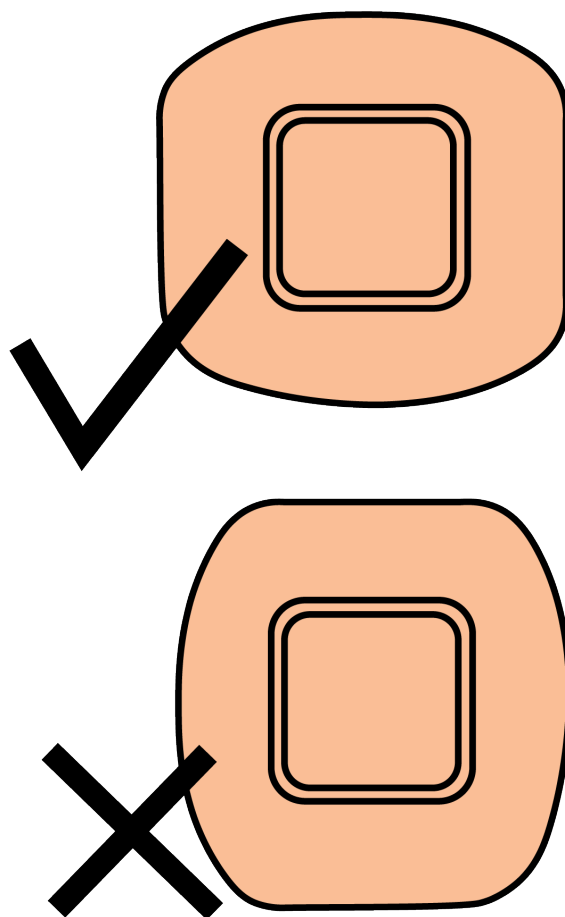

3. Activar el parche


Después de haber aplicado el parche bajo la axila, puedes comenzar. Pulsa “Lectura del parche” en la App femSense y mantén la parte trasera de tu smartphone durante unos segundos tranquilamente sobre el centro del parche para activarlo. Una vibración confirma que se ha activado con éxito.



Posición para la comunicación NFC

Dependiendo del fabricante de su teléfono y su sistema operativo (Apple iOS o Android), el smartphone tiene que situarse de manera diferente sobre el parche para una óptima lectura de datos.

- **iPhone:** Mantén la parte trasera del borde superior ligeramente inclinada hacia el centro del parche.
- **Android:** En Android, la antena NFC puede encontrarse en diferentes zonas del smartphone. Situa la zona de la cámara sobre el centro del parche, o la parte trasera del smartphone sobre el centro del parche. Por favor, asegúrate de que tienes NFC encendido. NFC puede activarse en el menú rápido o en la configuración.

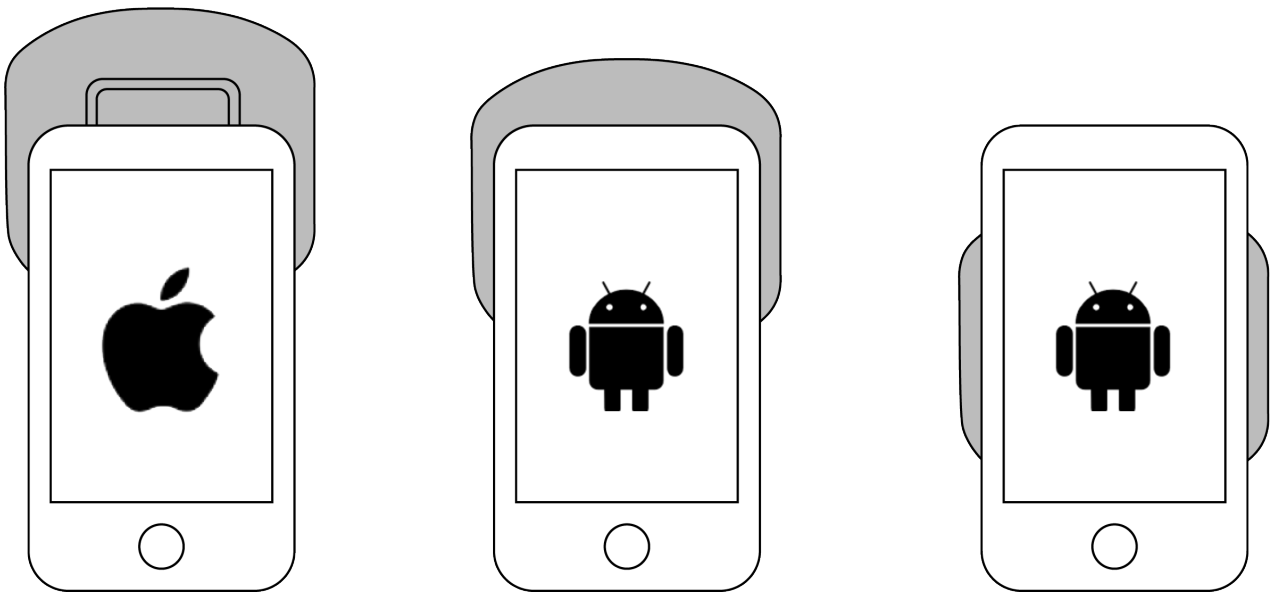

4. Lectura del parche

Una vez iniciado, deberás leer el parche dos veces al día para obtener información actualizada sobre tu estado de fertilidad, así como sobre tu ovulación. Para ello, pulsa "Hoy" en el menú rápido de la App femSense, pulsa "Lectura del parche" y mantén tu smartphone sobre el parche como se describe en el punto 3 (Activar el parche). Los datos de su temperatura serán leídos por el parche y se mostrará si se ha detectado tu ovulación. También puedes leer el parche varias veces al día.

El Calendario

El calendario de la App femSense es un control de ciclo en el que puedes recibir pronósticos sobre tus próximos períodos, así como sobre tus días fértiles, y también puedes introducir datos tú misma. El calendario también muestra cuándo hay que aplicar el parche.

En el modo objetivo:embarazo, los días fértiles se marcan con corazones y tus días de periodo predichos se resaltan en rosa claro y oscuro. En el modo de seguimiento de la fertilidad, los días de alta fertilidad se muestran en rosa. Si su estado de fertilidad no puede ser determinado claramente por femSense, dichos días se marcan en gris en el calendario. La visualización de los días de periodo es idéntica a la del modo objetivo:embarazo.

Si femSense ha determinado su ovulación, el día de ovulación está marcado con un anillo rosa.

Si pulsas una fecha en el calendario, te llevará a la vista detallada de ese día en concreto. Pulsando el botón (+) puedes introducir más datos, como el período, enfermedades o actividades deportivas.

Todos los datos introducidos por ti serán tratados de forma absolutamente confidencial y no serán transmitidos a terceros.

Las estadísticas

En las estadísticas se detalla un resumen del control de tus ciclos con femSense, la duración media de ellos y los días del período, así como una visión general de los datos introducidos durante el ciclo.

El menú

El menú de la App femSense está dividido en 2 áreas, donde puedes gestionar tu cuenta y encontrar funciones e información adicionales.

En "Mi cuerpo y yo" puedes ver y editar tu cuenta, así como los datos del usuario. En "Selección de modo" puedes cambiar el modo de funcionamiento de la App femSense. Además, en "Mi cuerpo" existe la opción de activar el modo embarazo de la App femSense. En este modo, la pantalla "Hoy" cambia y obtienes información sobre el progreso de tu embarazo.

En "femSense" encontrarás las instrucciones de uso, así como las condiciones de uso y la política de privacidad, todos los vídeos explicativos y tutoriales de la App femSense y podrás ver la versión de la aplicación femSense en "Sobre femSense". Pulsando en "Soporte de contacto", puede ponerse en contacto con el soporte técnico en caso de problemas. El botón "Preguntas frecuentes" le llevará a las preguntas más frecuentes.

Además, a través del menú de la App puedes acceder a la Webshop de femSense, al Blog de femSense y también puedes valorar femSense en la App Store. .

Más información

- Términos y condiciones: <https://www.femsense.com/es/conditions/>
- Protección de datos: <https://www.femsense.com/es/dataprotection/>
- Rescisión: <https://www.femsense.com/es/cancellation/>
- Aviso legal: <https://www.femsense.com/es/legal-notice/>

Síguenos en las redes sociales



Desechado

El parche se abastece con una pila de botón y por lo tanto se considera un dispositivo electrónico y no debe tirarse a la basura doméstica normal, sino que debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de residuos de pilas y aparatos eléctricos. El embalaje individual puede ser separado y desechado en los residuos de plástico o papel.



Datos técnicos

- Tipo de medidor: sensor de temperatura para la detección de la ovulación
- Lugar de medición: en lateral del pecho bajo el brazo
- Tipo de uso: Producto desechable
- Período de aplicación típico : 7 días
- Condiciones de funcionamiento:
 - Temperatura ambiente: +15 a +42°C
 - Humedad: 15 a 95%, sin condensación
 - Presión de aire: 86 a 106 kPa
- Condiciones de transporte y almacenamiento:
 - Temperatura ambiente: 0 a +40°C
 - Humedad: 15 a 95%, sin condensación
 - Presión de aire: 86 a 106 kPa
- Compatibilidad del sistema:
 - iPhone: iOS13 o superior en iPhone 7 o modelos superiores
 - Android: Android OS 6.0 Marshmallow o modelos mas recientes en un smartphone habilitado con NFC
- Conexión a Internet mínimo 3G o WIFI
- Garantía: 2 años después de la producción
- Dimensiones: 66,3 x 61,2 x 3 mm
- Peso: 3 g
- Fuente de alimentación: Batería de botón de litio de 3 V
- Clasificación IP: IPX5 - Protección contra los chorros de agua de cualquier dirección

